



Cinta Quirúrgica Durapore[®]

- Cinta quirúrgica de alta resistencia con textura similar a la seda.

CARACTERÍSTICAS

Cinta quirúrgica de tafetan (similar a seda), de alta resistencia y adhesivo hipoalergénico de acrilato. Su soporte exterior permite realizar corte bidireccional sin el uso de tijeras.

VENTAJAS

3M Durapore[®] es sensible a la presión y con adherencia inicial alta desde el inicio de la aplicación.


La cinta quirúrgica es libre de látex y resistente al agua.

BENEFICIOS

3M Durapore[®] tiene una alta resistencia que asociada a su poderosa adhesión, esto permite un buen desempeño para fijar dispositivos médicos críticos. Además es altamente versátil lo que facilita su uso en muchas intervenciones clínicas críticas. 3M Durapore[®] es sensible a la presión y con adherencia inicial alta desde el inicio de la aplicación.

La cinta quirúrgica es libre de látex y resistente al agua.

La cinta 3M Durapore[®] se desempeña con buena adhesión a la piel seca.

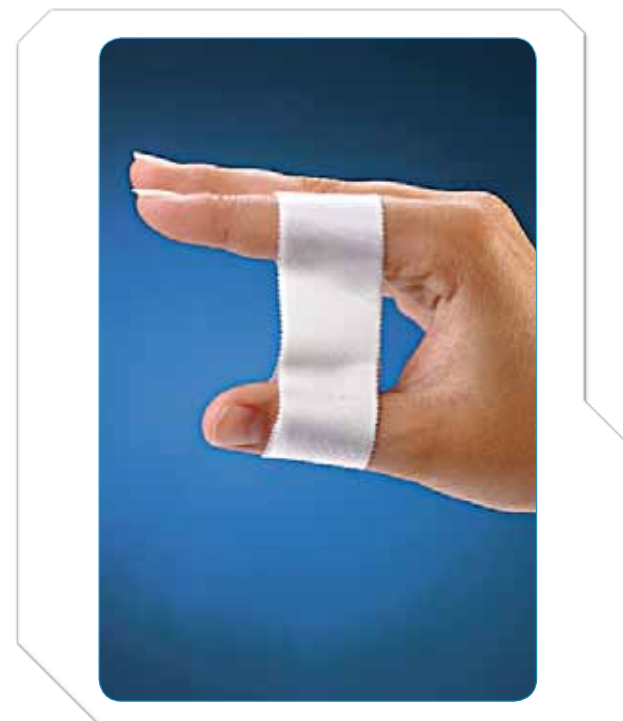

Tiene una alta resistencia asociada a su poderosa adhesión.

■ Usos:

- Asegurar tubos y dispositivos médicos voluminosos.
- Anclaje de apósitos de mayor volumen.
- Inmovilizar dedos.
- Fijación de férulas.

■ Aplicación:

- Aplique la cinta sin tensión, desde el centro de la aplicación hacia fuera, de manera suave pero haciendo presión sobre la piel para maximizar la adhesión.
- La cinta debe extenderse al menos 2,5 cms desde el borde del apósito o tubo.

■ Retiro:

- Desprender un extremo de la cinta aplicada y desde este retirar en 180° a favor del crecimiento del vello, sosteniendo la piel donde estaba adherida la cinta.
- Hágalo de forma suave para minimizar el daño en la piel frágil.



Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
1538-1	3M Durapore [®]	2.5 cms x 9.1 mts	Caja	12 Rollos
1538-2	3M Durapore [®]	5 cms x 9.1 mts	Caja	6 Rollos